

CARTUCHO

OPTI-FREE* EXPRESS*

Solução de desinfecção multipropósito

Conforto prolongado

Conforto durante todo o dia

Limpa – Enxagua – Desinfeta – Reidrata – Conserva

Para todas as lentes de contato gelatinosas, inclusive as de silicone hidrogel.

Apresentações comerciais: 60 mL, 90 mL, 120 mL, 240 mL, 300 mL, 355 mL e 470 mL.

Kit promocional: 300 mL + 120 mL e 355 mL + 120 mL

Composição

OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, †TETRONIC® 1304 e edetato dissódico com POLYQUAD* (poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0005% como conservantes.

Não utilize OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito se você é alérgico a qualquer componente.

Vide instruções de uso com instruções completas e informações importantes sobre segurança. A instrução de uso está impressa no interior do cartucho.

Armazenar entre 15°C e 30°C.

Não use para desinfecção térmica.

Use antes da data de validade marcada no produto.

Descartar qualquer quantidade não-utilizada do produto 6 meses após a abertura do frasco.

Lacre de Segurança

Para sua proteção, este frasco possui um lacre impresso ao redor do bocal. Não use se o lacre estiver violado ou ausente no momento da compra. Remova completamente o lacre impresso ao redor do bocal antes do uso.

Reg. ANVISA: 80153480149

Resp. Téc.: Victor A. C. A. Lopes - CRF nº 74569

Fabricado por:

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

Importado e Distribuído por:

NOVARTIS BIOCÍÊNCIAS S.A.

Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06

Barueri SP

CNPJ 56.994.502/0015-35

Indústria Brasileira

FAB:

LOTE:

VALIDADE:

†TETRONIC® é uma marca registrada de BASF corporation.

©2017 Novartis

*marca registrada de Novartis

Estéril

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 707 7908

sac.brasil@alcon.com

www.br.alcon.com

www.optifree.com.br

Origem do produto:

Estados Unidos da América

INSTRUÇÕES DE USO

OPTI-FREE* EXPRESS*

Solução de desinfecção multipropósito

Conforto Prolongado

Esta instrução de uso contém informações importantes sobre o uso e a segurança do produto. Favor ler atentamente e guardar para uso futuro.

Limpa – Enxagua – Desinfeta – Reidrata – Conserva
Para lentes de contato gelatinosas e silicone hidrogel

Composição

OPTI-FREE* EXPRESS* SDMP é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, †TETRONIC® 1304 e edetato dissódico com POLYQUAD* (poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0005% como conservantes.

Ações (Modo de Ação)

Sempre quando utilizado conforme a indicação, OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito:

- Limpa através do desprendimento e remoção do acúmulo de proteínas e outros depósitos e resíduos das suas lentes durante a desinfecção e armazenamento;
- Elimina microorganismos prejudiciais (germes) da superfície das lentes;
- Enxagua e armazena lentes de silicone hidrogel e lentes gelatinosas (hidrofílicas);
- Desinfeta e armazena lentes por até 30 dias após a desinfecção;
- Hidrata a superfície da lente com uma fina camada hidratante, permitindo que a lente permaneça mais hidratada durante o dia;
- Umedece suas lentes e alivia irritações brandas e desconfortos durante o uso.

Conforto e Benefícios de Hidratação no Uso de Lentes de Contato

Enquanto as lentes estão no estojo, OPTI-FREE* EXPRESS* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito hidrata a superfície da lente, deixando uma camada hidrofílica. Isto mantém um escudo hidratante entre a lente e o olho, melhorando o conforto através do alívio da secura e irritação associado com o uso de lentes de contato.

Indicações

OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito é indicada para o uso diário na limpeza, reidratação, enxague, remoção de depósitos de proteínas, desinfecção química (não térmica) e conservação de lentes silicone hidrogel e lentes gelatinosas, de acordo com o recomendado por seu oftalmologista. OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito também pode ser utilizada com OPTI-FREE* SUPRACLENS removedor de proteína diário.

Contra-indicações (razões para não usar)

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de OPTI-FREE* EXPRESS* SDMP não devem utilizar este produto.

Instruções Gerais

- Sempre lavar e enxaguar suas mãos inteiramente e secá-las com uma toalha limpa e livre de fiapos antes de manusear suas lentes de contato.
- Limpar, enxaguar e desinfetar suas lentes toda vez que removê-las;
- Não exponha suas lentes de contato à água não-estéril enquanto as estiver usando;
- Substitua o estojo de lentes de contato pelo menos a cada 3 meses ou de acordo com o recomendado pelo fabricante do estojo.

Instruções de Uso:

- Enxaguar completamente cada lado da lente com OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito;
- Friccione cada lado da lente por 10 segundos (para um tempo total de 20 segundos de fricção);
- Enxágue cada lado da lente com um fluxo constante de OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito por 10 segundos (para um tempo total de 20 segundos de fricção);
- Encher o estojo para lentes com uma solução nova de OPTI-FREE* EXPRESS* SDMP;
- Deixar as lentes no estojo fechado durante a noite ou por pelo menos seis horas. Após a conservação no estojo, as lentes estão prontas para o uso;
- Se qualquer resíduo permanecer nas lentes de contato, enxágue com OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito antes de colocá-las. Você pode deixar as suas lentes armazenadas no estojo fechado contendo OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito por no máximo trinta dias. Após este período, as lentes devem ser limpas e desinfetadas novamente com uma solução nova de OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito a cada trinta dias e sempre antes de usar suas lentes;

Se irritações brandas, desconforto ou embaçamento ocorrer durante o uso de suas lentes de contato, adicione uma ou duas gotas de OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito diretamente nos olhos e pisque duas ou três vezes. OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito pode ser usada para reidratação, conforme necessário ao longo do dia.

Se estiver utilizando OPTI-FREE* SUPRACLENS removedor de proteína diário, siga estas instruções, incluindo o enxague antes de colocar as lentes de contato.

Advertências

Seguir as instruções de seu oftalmologista e todas as instruções que constam neste produto para usar e conservar corretamente as lentes de contato e os produtos que se usam para seu cuidado, inclusive o estojo. Não reutilize ou “complete” a solução no estojo da lente, pois isso pode reduzir a eficácia de desinfecção. Problemas oculares, incluindo infecção ou úlceras na córnea, pode desenvolver-se rapidamente e levar à perda de visão. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, tirar imediatamente as lentes e consultar seu oftalmologista, porque o problema pode tornar-se mais sério.

Precauções

- Não utilize se o lacre do produto estiver violado ou ausente antes da primeira abertura;
- Sempre usar uma solução nova de OPTI-FREE* EXPRESS* SDMP. Nunca reutilizar a solução do seu estojo para lentes;
- Nunca use água, solução salina ou gotas re-umectantes para desinfetar suas lentes;
- Para evitar contaminação, não tocar o conta-gotas em qualquer superfície;
- Tampar após o uso;
- Armazenar entre 15°C e 30°C;
- Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado;
- Usar antes da data de validade marcada no produto;
- Descartar qualquer quantidade não-utilizada do produto 6 meses após a abertura do frasco;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Não usar para desinfecção térmica.

Efeitos Adversos

Se você apresentar desconforto ocular persistente, lacrimejamento excessivo, visão alterada ou vermelhidão nos olhos, remova suas lentes de contato imediatamente. Consulte seu oftalmologista para identificar o problema e procure tratamento para evitar uma lesão grave. Uma infecção ocular pode estar presente e, se não tratada, pode levar à perda da visão.

Conteúdo da Embalagem (Como é Fornecido)

OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito é esterilizada por filtração e fornecida em frascos de plásticos esterilizados em apresentações de 60 mL, 90 mL, 120 mL, 240 mL, 300 mL, 355 mL, 470 mL, 300 mL + 120 mL ou 355 mL + 120 mL. Os frascos e cartuchos são marcados com o número de lote e a data de validade.

Reg. ANVISA: 80153480149

Resp. Téc.: Victor A. C. A. Lopes - CRF nº 74569

Fabricado por:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

Importado e Distribuído por:

NOVARTIS BIOCIEÊNCIAS S.A.
Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06
Barueri SP
CNPJ 56.994.502/0015-35
Indústria Brasileira

†TETRONIC® é uma marca registrada de BASF corporation.

©2017 Novartis

*marca da Novartis

Estéril

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 707 7908
sac.brasil@alcon.com
www.br.alcon.com
www.optifree.com.br

Origem do produto:

Estados Unidos da América

RÓTULO

OPTI-FREE* EXPRESS*

Solução de desinfecção multipropósito

Vide instrução de uso para maiores instruções e outras informações importantes de segurança.

Conforto prolongado

Conforto durante todo o dia

Remove proteínas das lentes diariamente

Limpa – Enxagua – Desinfeta – Reidrata – Conserva

Para todas as lentes de contato gelatinosas, inclusive as de silicone hidrogel.

Apresentações: 60 mL, 90 mL, 120 mL, 240 mL, 300 mL, 355 mL e 470 mL.

Kit promocional: 300 mL + 120 mL e 355 mL + 120 mL

Composição

OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito é uma solução aquosa, isotônica, tamponada e estéril que contém citrato de sódio, cloreto de sódio, ácido bórico, sorbitol, aminometilpropanol, †TETRONIC® 1304† e edetato dissódico com POLYQUAD* (poliquaternium-1) 0,001% e ALDOX* (miristamidopropil dimetilamina) 0,0005% conservantes.

Não utilize OPTI-FREE* EXPRESS* solução de desinfecção multipropósito se você é alérgico a qualquer componente.

Armazenar entre 15°C e 30°C.

Não use para desinfecção térmica.

Use antes da data de validade marcada no produto.

Descartar qualquer quantidade não-utilizada do produto 6 meses após a abertura do frasco.

Para evitar contaminação, não toque o conta-gotas do frasco. Mantenha o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.

Lacre de Segurança

Para sua proteção, este frasco possui um lacre impresso ao redor do bocal. Não use se o lacre estiver violado ou ausente no momento da compra. Remova completamente o lacre impresso ao redor do bocal antes do uso.

Reg. ANVISA: 80153480149

Resp. Téc.: Victor A. C. A. Lopes - CRF nº 74569

Fabricado por:

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

Importado e Distribuído por:

NOVARTIS BIOCIEÊNCIAS S.A.

Av. Ceci, 1800 – Lote 04 Gleba 06

Barueri SP

CNPJ 56.994.502/0015-35

Indústria Brasileira

FAB:
LOT:
VAL:

†TETRONIC® é uma marca registrada de BASF corporation.

©2017 Novartis
*marca da Novartis

Estéril

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 707 7908
sac.brasil@alcon.com
www.br.alcon.com
www.optifree.com.br

Origem do produto:
Estados Unidos da América

Milena Gutierrez Chaw
Representante Legal

Victor A. C. Lopes
Resp. Técnico: CRF-SP nº 74569